



I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev 013 del 22 ottobre 2019

Prodotto: reflexx 40 art. R40/ XS - art. R40/ S – art. R40/ M – art. R40/ L– art. R40/ XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 1/4

## GUANTI MONOUSO IN LATTICE DA ESAME MARCHIO REFLEXX 40

### 1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.p.A.  
Via Passeri, 2  
46019 VIADANA (MN)  
Tel. 0375 758891 Fax. 0375 464504

### 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO:

- ❑ Guanto per ispezione monouso in lattice di gomma naturale, ad elevata sensibilità, destrezza e comfort.
- ❑ Guanto non sterile, finemente talcato all' interno con polvere di origine vegetale (amido di mais) per facilitare la calzata.
- ❑ Guanto a cinque dita con bordino arrotolato, ambidestro, di colorazione biancastra e superficie liscia.
- ❑ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anche contro prodotti chimici e microrganismi
- ❑ Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz.
- ❑ Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni



#### Imballo - Pack

100		10	
Taglia Size	Articolo Article	Taglia Size	Cartone Carton
R40 XS	8032891631324	XS	8032891636329
R40 S	8032891631331	S	8032891636336
R40 M	8032891631348	M	8032891636343
R40 L	8032891631355	L	8032891636350
R40 XL	8032891631362	XL	8032891636367

### 3. QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI:



-Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425 (ANCI CIMAC, corso Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV): ente certificatore autorizzato n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative è certificato in accordo con le normative EN ISO 374-1:2016 TIPO B e EN ISO 374-5:2016.

-Dispositivo Medico CLASSE I - Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4  
CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE - Progressivo di Sistema





I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev 013 del 22 ottobre 2019

Prodotto: reflexx 40 art. R40/ XS - art. R40/ S – art. R40/ M – art. R40/ L – art. R40/ XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 2/4

Attribuito al DM mis. XS/1557586 S/1557587 M/1557588 L/1557589 XL/1557590

-Il prodotto è conforme alle normative ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea)



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/1973

Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

#### 4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI:

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min. (mm)	Largh. mm
R40/ XS (6)	240	70-79
R40/ S (7)	240	80-89
R40/ M (8)	240	90-99
R40/ L (9)	240	100-109
R40/ XL (10)	240	110-119

Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.09
-------------	------------------	------

ISO 2859		
AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori	AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità	AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N (min)
------------------	-------------------	------------

EN 420:2003 + A1 2009	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5 mm

EN 374-2:2014	Prova di perdita d'acqua	superata
	Prova di perdita d'aria	superata





I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev 013 del 22 ottobre 2019

Prodotto: reflexx 40 art. R40/ XS - art. R40/ S – art. R40/ M – art. R40/ L– art. R40/ XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 3/4

EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:	COD	EN 16523-1:2015 TIPO B		EN 374-4:2013
		Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Acido solforico 96%	L	2	>30'	92%
Sodio idrossido 40%	K	3	>60'	26%
Dietilammina	G	2	>30'	63%
p-Fenilendiammina 5%		3	>60'	41%
Butildiglicole (dietilen glicol mono butil etere)		2	>30'	64%
Butilglicole (2-butossietanolo)		2	>30'	53%
Acido Cloridrico 15%		3	>60'	62%
Acido Citrico 10%		3	>60'	39%
Acido Fosforico 40%		2	>30'	88%
Idrossido di Potassio 15%		3	>60'	19%
Sodio Idrossido 15%		3	>60'	21%

## 5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto.
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto.
3. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite
4. Prima dell'uso rimuovere la polvere in eccesso eventualmente presente all'esterno; dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici.
6. Il guanto è idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica. I risultati sono ottenuti in condizioni di laboratorio e possono non riflettere la durata effettiva sul posto di lavoro.
7. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
8. Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV. In caso di reazione sospendere l'utilizzo e consultare un medico
9. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
10. Conservare il prodotto nella confezione originale in luogo asciutto
11. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
12. La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato





I N S A F E H A N D S

**REFLEXX S.p.A. Unipersonale**

**NOTA INFORMATIVA**

**rev 013 del 22 ottobre 2019**

Prodotto: reflexx 40 art. R40/ XS - art. R40/ S – art. R40/ M – art. R40/ L– art. R40/ XL

*Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico*

Pag.: 4/4

13. I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali

~~**REFLEXX S.p.A.**  
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)  
P.I. e C.F. 02085450209  
Tel. 0375/833164 - Fax: 0375/464504  
e-mail: info@reflexx.com~~

