



I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev. 06 del 04 dicembre 2019

Prodotto REFLEXX 44: R44/S - R44/M - R44/L - R44/XL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 1/3

GUANTI MONOUSO DA ESAME IN LATTICE SENZA POLVERE MARCHIO REFLEXX 44 black

1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 758891 Fax. 0375 464504

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- ❑ Guanto per ispezione monouso in lattice di gomma naturale, ad elevata sensibilità, destrezza e comfort.
- ❑ Guanto a cinque dita con bordino arrotolato, ambidestro, di colore nero e superficie microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
- ❑ Guanto non sterile, privo di polvere all'interno e internamente ed esternamente clorinato per facilitare la calzatura e ridurre il rischio di allergie.
- ❑ Guanto con contenuto proteico inferiore a 50 µg/g.
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anche contro prodotti chimici e microrganismi
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esame, anche invasivo, destinato ad un uso temporaneo.
- ❑ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici ed è particolarmente consigliato in estetica per trattamenti e tinture, tatuaggi, meccanica, industrie ed hobbistica.
- ❑ Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz
- ❑ Imballaggio esterni contenenti n° 10 confezioni



Imballo - Pack

100		10	
Taglia Size	Articolo Article	Taglia Size	Cartone Carton
R44 S	8032891632192	S	8032891637197
R44 M	8032891632208	M	8032891637203
R44 L	8032891632215	L	8032891637210
R44 XL	8032891632222	XL	8032891637227

3. QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI:



- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425 (ANCI CIMAC, corso Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV): ente certificatore autorizzato n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative è certificato in accordo con le normative EN ISO 374-1:2016 TIPO B e EN ISO 374-5:2016.

-Dispositivo Medico CLASSE I - Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4 CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE - Progressivo di Sistema Attribuito al DM: S/ 1549201 M/ 1549202 L/ 1549203 XL/ 1549204



4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min. (mm)	Largh. mm
R44/ S (7)	240	80-89
R44/ M (8)	240	90-99
R44/ L (9)	240	100-109
R44/ XL (10)	240	110-119

EN 420:2003 + A1 2009	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5 mm

Spessore mm	Palmo (+/- 0.03)	0.12
-------------	------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N (min)
-------------------------	-------------------	------------

EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:	COD	EN 16523-1:2015 TIPO B		EN 374-4:2013
		Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Acido solforico 96%	L	2	>30'	92%
Sodio idrossido 40%	K	3	>60'	26%
Dietilammina	G	2	>30'	63%

ISO 2859		
AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori	AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità	AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

EN 374-2:2014	Prova di perdita d'acqua	superata
	Prova di perdita d'aria	superata

5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
3. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
4. Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV. In caso di reazione sospendere l'utilizzo e consultare un medico
5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici
6. Il guanto è idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di



I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev. 06 del 04 dicembre 2019

Prodotto REFLEXX 44: R44/S - R44/M - R44/L - R44/XL

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 3/3

permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica. I risultati sono ottenuti in condizioni di laboratorio e possono non riflettere la durata effettiva sul posto di lavoro.

7. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
9. Conservare il prodotto nella confezione originale in luogo asciutto
10. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
11. La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato
12. I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali

REFLEXX S.p.A.

Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel.: 0375/633164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com

