

GUANTI MONOUSO IN LATTICE DA ESAME MARCHIO REFLEXX 51

1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 758891 Fax. 0375 464504

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO:

- ❑ Guanto per ispezione monouso in lattice di gomma naturale, ad elevata sensibilità, destrezza e comfort.
- ❑ Guanto non sterile, finemente talcato all' interno con polvere di origine vegetale (amido di mais) per facilitare la calzata.
- ❑ Guanto a cinque dita con bordino arrotolato, ambidestro, di colorazione biancastra e superficie liscia.
- ❑ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici e può venire a contatto con diversi alimenti.
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.
- ❑ Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) per rischi minori.
- ❑ Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile.
- ❑ Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni realizzati con cartone ondulato riciclabile.

Imballo		
Cod./Taglie	100 Confezione	10 Cartone
R51/XS	8032891632994	8032891637999
R51/S	8032891633007	8032891638002
R51/M	8032891633014	8032891638019
R51/L	8032891633021	8032891638026
R51/XL	8032891633038	8032891638033

3. QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI:



-Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN420 e EN ISO 374.

-Dispositivo Medico CLASSE I - Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4 CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/1973

Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI:

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min. (mm)	Largh. mm
R51/ XS (6)	240	70-79
R51/ S (7)	240	80-89
R51/ M (8)	240	90-99
R51/ L (9)	240	100-109
R51/ XL (10)	240	110-119

Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.08
-------------	------------------	------

ISO 2859		
AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori	AQL 2.5 (livello S2) per maggiori difettosità	AQL 2.5 (livello S2) per minori difettosità

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N (min)
------------------	-------------------	------------

EN 420:2003 + A1 2009	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5 mm

EN 374-2:2014	Prova di perdita d'acqua	superata
	Prova di perdita d'aria	superata

5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto.
- Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto.
- Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite
- Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici.
- Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV. In caso di reazione sospendere l'utilizzo e consultare un medico
- Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto
- Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
- La scadenza è indicata sulla confezione vendita e va intesa con prodotto debitamente conservato
- I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali

REFLEX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. +39 0375 5166 - Fax: 0375 464504
e-mail: info@reflexx.com